

Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

Produkt: vetFIX Fleece 15 blau

Artikelbezeichnung: vetFIX Fleece 15 blau

Artikelnummer: 30012v

1. Technische Merkmale:

Maße Material: ca. 15cmx250m

Gewicht: ca. 2,8 kg

Material: Polypropylen

2. Verwendungszweck

Das Produkt ist ein Hilfsmittel zur Positionierung, Stabilisierung und Sicherung vor, während und nach veterinärmedizinischen Eingriffen und Untersuchungen.

Das Produkt wird als Rolle in einem Karton geliefert, aus dem das Fleece herausgezogen und in die gewünschte Länge geschnitten wird.

3. Anwendungshinweise

Die Anwendung des Produktes bedarf eines zusätzlichen Patch-Gegenstücks, welches an jeder Untersuchungseinrichtung (Tisch, Liege, OP-Tisch etc.) angebracht wird. An dieses Gegenstück wird das Fleece angelegt und über mindestens 1 Kante zum jeweiligen zu fixierenden Tier oder Gegenstand geführt. Dadurch erst wird ein fester Sitz gewährleistet.

Zur leichteren Fixierung von Extremitäten (oder des Beatmungsschlauches) kann das Fleece in die Hälfte gefaltet (auf 7,5cm) und mit einem Schnitt von max 3cm versehen werden. Durch den entstandenen ca 6 cm breiten Schlitz wird das andere Ende des Fleecebandes geführt und man erhält eine breitflächige Schlaufe, die um die Extremität des Tieres gelegt werden kann. Durch sanften Zug festigt sich die Schlaufe und erlaubt eine exakte Positionierung, ohne die Extremität einzuschnüren, sofern nicht zu fest zugezogen wird. Es entsteht auch eine Öffnung in dieser Schlaufe, die für das Bedienen einer etwaigen Venenkanüle genutzt werden kann.

Das andere Ende des Fleece wird dann unter den OP-Tisch geführt und dort an das angebrachte Patch-Gegenstück angelegt.

4. Warnhinweise

- Nicht die glatte Seite für die Verbindung mit dem Patch verwenden, um eine ungewollte Ablösung zu vermeiden.
- Nicht in Bereich des Halses anwenden, um eine Strangulation zu vermeiden.
- Bei sedierten Tieren Gurte im gesamten Oberkörperbereich nicht so fest anlegen, dass die Atmung behindert oder eingeschränkt wird.
- Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, verwenden sie die Fleecebänder jeweils nur für ein Tier (single patient use)

- Die Länge des Bandes immer so wählen, dass nicht zu viel Überlänge besteht, da diese zu einer leichteren und ungewollten Ablösung vom Patch (durch Eigengewicht) führen kann
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.

5. Reinigungshinweise

Das Produkt ist ein Einwegprodukt und nach jedem Patienten zu entsorgen.

6. Lagerung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend, eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte. Der Spenderkarton wird aufrecht gelagert um ein reibungsloses Herausziehen des Bandes von der Rolle zu ermöglichen.

7. Entsorgung

Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Das Fleece ist giftfrei hergestellt und kann im Restmüll entsorgt werden. Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Hersteller: www.medstorm.at